


INSTRUCTIE KEEL TEST

Dit is een betrouwbare test voor chlamydia en gonorroe.


Lees de instructies goed door. Het is niet moeilijk, maar doe wel precies wat er staat. Zo voorkom je fouten tijdens de afname en het verzenden van het materiaal naar het laboratorium.




1. Om wat slijm af te nemen uit de keel is het eenvoudiger als iemand anders dit bij je kan doen. Is dit niet mogelijk, ga dan voor een spiegel staan, zodat je goed in je keel kunt kijken.

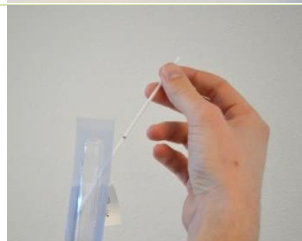

2. Plaats het buisje in een beker zodat de vloeistof er niet uit loopt. Open de verpakking en haal het stokje eruit zonder het wattengedeelte aan te raken.

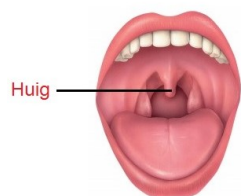


3. Neem een gemakkelijke houding aan, buig je hoofd iets achterover. Doe je mond wijd open. Zeg AAA zodat je de huig goed kunt zien. Probeer te voorkomen dat je met het wattenachtige deel je tong of wang aanraakt.

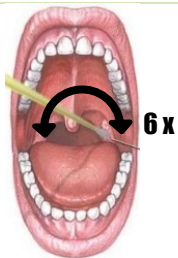

4. Breng het wattenachtige deel van het stokje achterin de keel, en wrijf 6x heen en weer langs de wand naast en achter de huig.

Er kan een kokhalsreflex ontstaan tijdens de afname. Wacht dan en ga vervolgens verder totdat je 6x gewreven hebt.

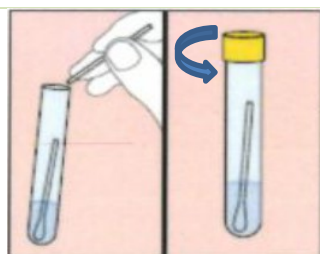

5. Plaats het wattenstokje terug in het buisje met de vloeistof. Breek het stokje bij de zwarte markering. Draai daarna het buisje goed dicht.



6. Stop het buisje in de plastic safetybag.

Let op! Sluit de safetybag pas als alle testen er in zitten