


INSTRUCTIE URINE TEST

Dit is een betrouwbare test voor chlamydia en gonorrhoe.


Lees de instructies goed door. Het is niet moeilijk, maar doe wel precies wat er staat. Zo voorkom je fouten tijdens de afname en het verzenden van het materiaal naar het laboratorium.




1. Neem bij voorkeur ochtendurine af. Indien niet mogelijk, zorg dan dat je voor het opvangen van de urine tenminste 1 uur niet geplast hebt.

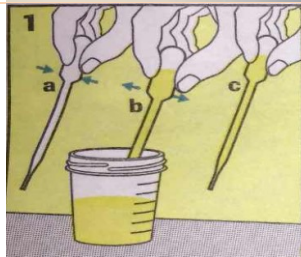

2. Vang de eerste straal van je urine op in een plastic bekertje. Pak de plastic pipet aan de bovenzijde vast en knijp in het bolle gedeelte. Plaats de pipet in de urine en stop met knijpen. De pipet vult zich nu met urine.

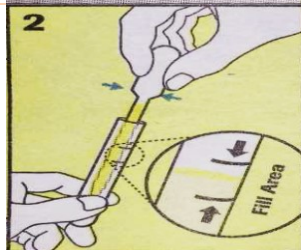

3. Open de gele dop van het buisje en houd de pipet in het buisje. Knijp in het bolle gedeelte van de pipet. De urine loopt nu in het buisje.

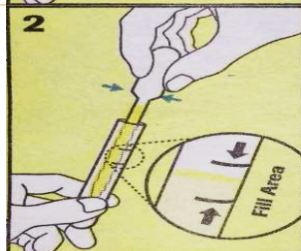

4. Vul het buisje tot binnen het aangegeven gebied (**tussen de streepjes met de pijltjes**).



5. Draai de dop van het buisje goed dicht!



6. Stop het buisje in de plastic safetybag.

Let op! Sluit de safetybag pas als alle testen er in zitten.